

Betriebsanleitung

POLIRET CLASSIC

LABORGERÄTE



REITEL Feinwerktechnik GmbH
Sensdamm 20 - 49152 Bad Essen
Tel.: +49(0)5472-9432-0 - Fax: +49(0)5472-9432-40
<http://www.reitel.com> - info@reitel.com

Sehr geehrter Kunde!

Die POLIRET CLASSIC ist eine hochwertige Poliereinheit aus Edelstahl. Der kraftvolle Motor lässt sich in zwei Geschwindigkeiten von 1.500 und 3.000 U/min. einstellen. Die POLIRET CLASSIC verfügt über einen kohlebürstenlosen für einen wartungsfreien und langlebigen Einsatz. Sie schleifen, polieren, rauhen auf, säubern und bürsten Metalle und Kunststoffe präzise und günstig. Die integrierte Absaugung nimmt den Schmutz direkt an der Spindel auf. Die Textil-Filterbeutel sind auswaschbar und daher häufig wieder zu verwenden. Die Absaugleistung an einer Seite wird durch Reduzierung der Absaugleistung auf der jeweils anderen Seite verstärkt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Benutzer, bzw. Betreiber des Gerätes.

Bitte vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig beachten.

Nach dem Auspacken des Gerätes ist zu prüfen, ob Transportschäden irgendwelcher Art aufgetreten sind. Beanstandungen sind innerhalb von 3 Tagen dem Transportunternehmen oder dem Hersteller zu melden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Diese Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten, empfehlen wir, die Betriebsanleitung an einem geschützten Ort in der Nähe des Gerätes aufzubewahren. Diese Dokumentation ist im Sinne des Urheberrechts geschützt. Die Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise, sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet. Bei Verlust ist diese gegen eine Schutzgebühr wieder zu beziehen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	4
1.1	GRUNDAUSSTATTUNG.....	4
1.2	SONDERZUBEHÖR	4
1.3	GERÄTEBESCHREIBUNG.....	5
1.4	TECHNISCHE DATEN.....	7
2	SICHERHEITSHINWEISE	8
2.1	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	8
2.2	GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE	9
3	AUFSTELLUNG	10
3.1	INSTALLATION.....	10
3.2	WERKZEUGMONTAGE	10
4	BEDIENUNG	10
4.1	BEDIENUNGSABLAUF.....	10
4.2	FILTERWECHSEL.....	11
4.3	LEUCHTMITTELWECHSEL.....	11
5	STÖRUNGSHILFEN	12
6	WARTUNG	13
7	GARANTIE	14
8	ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN	18
9	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19

1 Technische Beschreibung

1.1 Grundausrüstung

- POLIRET CLASSIC Poliermaschine
- Rechte und linke Polierspindel
- 2 Filterbeutel
- 2 Poliertröge

1.2 Sonderzubehör

- Best.-Nr. 24900 Vario-Hubtisch
- Best.-Nr. 22702.2 Filterbeutel

1.3 Gerätebeschreibung

- 1 Linke Feststellschraube
- 2 Linke Lüftungklappenverstellung
- 3 Drehzahlstufenschalter
- 4 Linkes Sicherheitsglas
- 5 Linke Polierspindel
- 6 Rechte Feststellschraube
- 7 Rechte Lüftungklappenverstellung
- 8 NOTAUS – Schalter
- 9 Einschalter
- 10 Ausschalter
- 11 Absaugungsschalter
- 12 Rechtes Sicherheitsglas
- 13 Rechte Polierspindel
- 14 Deckel
- 15 Gerätesicherung
- 16 Netzgerätesteckdose
- 17 Leuchtmittel
- 18 Abdichtung Polierwelle
- 19 Poliertrog
- 20 Filterbeutel
- 21 Halteringe
- 22 Filterstutzen



Abb.: Geräteansicht



Abb.: Seitenansicht



Abb.: Geräteinnenraum

1.4 Technische Daten

Netzanschluss	230 V/50–60 Hz
Leistung Motor	400 W
Leistung Absaugung	190 W
Höhe/Breite/Tiefe	510/700/530 mm
Gewicht	60 kg
Drehzahl, 2 Stufen	1.500/3.000 U/min.
Absaugung	600 m ³ /h
Schalldruckpegel	≤ 70 dB(A)
Gehäuse	Edelstahl
Best.-Nr.:	11111
Made in Germany (Änderungen vorbehalten)	

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Jedes Gerät verlässt nach Endprüfung und einem Probelauf das Werk. Sollte jedoch durch Transport oder andere Umstände das Gerät beschädigt oder verändert sein, so darf es nicht in Betrieb genommen werden. Kontrollieren Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Beschädigte Teile sind sofort zu ersetzen.
- Alle elektrischen- und sonstigen Versorgungsanschlüsse dürfen nur entsprechend der technischen Daten angeschlossen werden. Die Werte dürfen nicht über- oder unterschritten werden. VDE-Vorschriften beachten. Nur zugelassene Schutzkontaktverbindung einsetzen.
- Die Vorschriften bezüglich eventuell erforderlicher Prüfungen (z.B. nach Berufsgenossenschaften oder elektrischer Anlagen) obliegen ausschließlich dem Käufer/Nutzer des Produktes.
- Dieses Gerät ist für einen Gebrauch entsprechend der technischen Beschreibung konzipiert und somit nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Jede andere Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig – hierbei erlischt die Haftung des Herstellers.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.
- Das Gerät nur in einem beheiz- und belüftbaren, sauberen Raum, ggf. unter einer Abzugshaube aufstellen.
- Die Aufstellfläche soll eben, gerade und eine dem Gebrauch entsprechende Stabilität aufweisen.
- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.
- Zur Vermeidung jeglicher Verletzungsgefahr ist angemessene Schutzkleidung zu tragen und entsprechendes Hilfswerkzeug zu verwenden (wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Zangen).
- Sind die zu erwartenden Arbeitsergebnisse nicht erfüllt, darf mit dem Gerät nicht weitergearbeitet werden. Für jeglichen Folgeschaden, der durch Weiterbenutzung entsteht, haftet der Eigentümer.
- Um Wasser-, Feuer- und Explosionsschäden zu vermeiden, unbedingt nach Arbeitsende oder Arbeitsunterbrechungen alle zuführenden Energiequellen absperren und gegen unbefugte Betätigung absichern.
- Bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sowie vor dem Öffnen des Gerätes, immer erst den Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.

- Reparaturen sind nur von qualifiziertem und zertifiziertem Personal durchzuführen. Es gelten die Bestimmungen in Kapitel 7 zur Garantieleistung.
- Bei Verdacht auf eindringende Flüssigkeit Betrieb stoppen und Service kontaktieren.
- Alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit überprüfen, ggf. Schlauchschellen nachziehen.

2.2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Achtung:

- Ziehen Sie den Netzstecker beim Trennen des Gerätes von der Haushaltsleitung erst 2 min. nach Abschalten des Gerätes, um die Kondensatoren zu entladen.
- Das Werkzeug muss sicher an der Drehspindel befestigt sein.
Es besteht Verletzungsgefahr!
- Bei zu hohen Drehzahlen besteht Verbrennungsgefahr!
- Gehäuse stets sauber und trocken halten.

- Ein Werkzeug- oder Lampenwechsel darf nur bei stillstehender Spindel und gezogenem Netzstecker vorgenommen werden.
- Beim Arbeiten die Schutzscheibe herunterklappen und Schutzbrille tragen.
- Nur geeignete und keine unwichtigen Werkzeuge benutzen. Auf festen Sitz achten.
- Absaugung einschalten.
- Nicht in die laufende Maschine greifen.
- Immer die Vorschriften des Werkzeugherstellers beachten (z.B. max. Drehzahl, zu bearbeitendes Material).
- Nur geeignete Materialien polieren. Vorschriften der Hersteller von Poliermittel und Werkstoffen beachten, insbesondere zum Gesundheitsschutz.
- Fest anliegende Kleidung tragen. Auch lose herabhängende Haare und Schmuckgegenstände, die in die Arbeitsspindel oder Werkzeug geraten könnten, vermeiden.
- Nur gereinigte, bzw. desinfizierte Materialien mit der Maschine bearbeiten.
- Bei Gefahr NOT-AUS Schalter (8) betätigen. Durch Drehen nach rechts ist der NOT-AUS Schalter wieder entriegelt.
- Halten Sie das zu polierende Werkstück fest. Gefahr von umherfliegenden Teilen, ggf. Beschädigungen des Werkstücks.

3 Aufstellung

Die elektrische Ausrüstung wird fertig installiert geliefert und kann mit Ihrem haushaltsüblichen 230 V / 16 A Anschluss betrieben werden. Beachten Sie zur Aufstellung die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

3.1 Installation

Für Die Abluft muss hinter dem Gerät mind. 20 cm Platz gelassen werden. Für den Filterwechsel muss über dem Gerät ausreichend Platz gelassen werden. Stellen Sie die Stromversorgung her.

3.2 Werkzeugmontage

1. Schieben Sie die Polierspindeln (5) und (13) fest auf die Achse. Sichern Sie die Polierspindeln mit der Inbusschraube und überprüfen Sie diese auf korrekten Sitz.
2. Drehen Sie das gewünschte Werkzeug auf die Polierspindeln (5) und (13) und prüfen Sie dieses auf korrekten Sitz.
Rechte Seite: Rechtsgewinde.
Linke Seite: Linksgewinde.
3. Durch Lösen der Inbusschraube können Sie die Polierspindeln (5) und (13) von der Achse entfernen. Verwenden Sie ggf. ein Abdrückwerkzeug.

4 Bedienung

4.1 Bedienungsablauf

1. Befestigen Sie das Polierwerkzeug ggf. füllen Sie Polierpaste und/oder Bimsstein in die Poliertröge ein oder tragen Sie diese auf das Polierwerkzeug auf.
2. Schalten Sie den Einschalter (9) ein.
3. Schalten Sie den Poliermotor mit Hilfe des Drehzahlstufenschalters (3) ein (Stufe 1 = 1500 U/min., Stufe 2 = 3000 U/min.).
4. Schalten Sie die Absaugung mit dem Absaugungsschalter (11) ein. Die Absaugleistung kann durch das Schließen einer Lüftungsklappe (2) bzw. (7) auf der anderen Seite erhöht werden.
5. Halten Sie das zu polierende Objekt gut fest und mit leichtem Druck gegen das rotierende Polierwerkzeug.
6. Schalten Sie bei Arbeitsende den Poliermotor mit dem Drehzahlstufenschalter (3) und den Ausschalter (10) aus.

4.2 Filterwechsel

1. Lösen Sie die Feststellschrauben (1) und (6) an der Geräte-Oberseite und nehmen Sie den Deckel (14) ab.
2. Entfernen Sie die alten Filterbeutel (20) durch Lösen der Halteringe (21) von den Filterstutzen (22).
3. Leeren Sie die Filterbeutel, ggf. waschen Sie diese aus (Maschinenwäsche 40 °C).
4. Stülpen Sie die neuen Filterbeutel mit dem Spannring auf den Stutzen, schließen Sie den Spannring und setzen Sie den Arbeitsraumdeckel wieder ein.

4.3 Leuchtmittelwechsel

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ausschalter (10) aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Schrauben Sie die Plexiglasabdeckung ab.
3. Fassen Sie das Leuchtmittel und ziehen Sie es heraus.
4. Führen Sie das neue Leuchtmittel bis zum festen Sitz ein.
5. Schrauben Sie die Plexiglasabdeckung wieder auf.

5 Störungshilfen

Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> a. NOT-AUS Schalter gedrückt. Schalter durch Drehen lösen, dann Gerät am Drehzahlstufenschalter (3) wieder einschalten b. Stromausfall → Gebäudesicherung prüfen. Gerät aus- (10) und wieder einschalten (11) c. Gerätesicherung (15) prüfen.
Absaugleistung zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> a. Filterbeutel (20) reinigen, ggf. auswechseln. Der Filter ist bei 40 °C in der Waschmaschine waschbar. Bitte beachten Sie eventuell die Vorschriften der Poliermittelhersteller. b. Deckel (14) ist undicht und muss fest montiert werden.
Motorleistung zu gering	<ul style="list-style-type: none"> a. Polierbürste zu groß (max. Durchmesser: ca. 150 mm) b. Anpressdruck zu groß.
Gerät läuft unruhig.	<ul style="list-style-type: none"> a. Unwucht der Polierscheibe, bzw. der Polerspindel prüfen. b. Spindel mit Inbusschlüssel lösen und Wechseln. c. Werkzeug wechseln (Gewindeart beachten).

6 Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gerätes. Achten Sie z.B. auf sichtbare Beschädigungen an Gehäuse oder Netzkabel.
- Reinigen Sie regelmäßig verschmutzte Werkzeuge und die Poliertröge (19).
- Ersetzen Sie regelmäßig verschlissene oder defekte Werkzeuge.
- Wechseln, bzw. waschen Sie regelmäßig den Filterbeutel (20) (siehe Kapitel 4.2 Filterwechsel).

Hinweis

Reinigen und pflegen Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Gerät mit dem REITEL Edelstahl-Pflegespray (Artikel-Nr.: 90405) zum Schutz vor Verunreinigungen und Korrosion. Es ist wasserabweisend und erzeugt einen Schutzfilm gegen Kalk, Gips und Staub.

7 Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir, die REITEL Feinwerktechnik GmbH, beginnend mit dem bescheinigten Verkaufsdatum eine 24-monatige Garantie (nur D, A, CH) dafür, dass dieses Produkt frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie richtet sich nach nachstehenden Bestimmungen:

Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service und regelmäßiger Wartung entsprechend den Angaben in unserer Betriebsanleitung einen Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler zeigen, werden wir oder einer unserer Fachhändler, bei dem das Produkt erworben wurde, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Ihre Rechte aus dieser Garantie beschränken sich auf den Anspruch auf Nacherfüllung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf jegliche Form von Schadenersatz gewährt diese Garantie nicht.

1.

Sollte es erforderlich werden, diese Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder direkt an unsere Serviceabteilung.

Kontakt:

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20

49152 Bad Essen

Deutschland

Telefon-Nr.: +49(0)5472-9432-32 (Serviceabteilung)

Telefon-Nr.: +49(0)5472-9432-0 (Zentrale)

Fax-Nr.: +49(0)5472-9432-40

2.

Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen müssen Sie die Seriennummer und Originalrechnung, den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Ferner müssen Sie einen schriftlichen Mängelbericht erstellen und uns das beanstandete Produkt zusammen mit diesem, ordnungsgemäß verpackt und kostenfrei, auf Ihre Gefahr zukommen lassen. Wir behalten uns das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produktes entfernt oder geändert wurden oder der Reklamation nicht beifügt sind.

3.

Garantiereparaturen müssen von uns oder entsprechend autorisierten Fachhändlern oder Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Unternehmen ausgeführt wurden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen, sowie Schäden, die dadurch am Produkt entstehen, von dieser Garantie nicht gedeckt werden.

4.

Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersatz leisten, gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. für das ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit.

5.

Sollte das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich von uns entwickelt und produziert wurde, müssen eventuelle Veränderungen am Produkt vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler des Produktes zurückzuführen und werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Kosten für derartige Umbauten oder Veränderungen sowie dadurch oder durch den Betrieb unter abweichenden Voraussetzungen am Produkt entstandene Schäden werden nicht erstattet.

6.

Ausgenommen von der Garantieleistung sind:

- Wartungs- und Inspektionsleistungen sowie Reparaturen oder Austausch von Teilen, bei denen es sich um Verschleißteile gemäß unserer Verschleißteilliste handelt;
- Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
- durch Missbrauch oder zweckentfremdete Verwendung des Produktes entstandene Schäden;
- durch falsche Installation des Produktes entstandene Schäden oder durch mangelnde Wartung (z.B. durch Verkalkung) verursachte Schäden;
- Schäden die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung, fehlendes Entkalken, unzureichende Pflege und Säuberung oder Nichteinhaltung der sonstigen im Rahmen der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Nutzungsregeln und Wartungsleistungen entstanden sind;

- Schäden die durch Nutzung des Produktes außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen entstanden sind;
- Schäden die nachweislich durch nicht originale Verbrauchs- oder Verschleißmaterialien entstanden sind;
- alle nicht direkt am Gerät entstandenen Schäden und sonstigen Nachfolgedefekte (z. B. Beschädigungen der Möbel durch Auslaufen von Wassers, Ausfall von Arbeitszeit, Material, Lohn und sonstige Folgeschäden).

Diese Garantie erlischt, wenn:

- an dem Produkt durch Sie oder durch einen Dritten Änderungen vorgenommen worden sind;
- das Produkt trotz Vorliegens eines Funktions- oder Gebrauchsmangels weiter betrieben wird.

7.

Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die unser Produkt legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.

8.

Verbrauchsmaterialien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Ersatzteile unterliegen einer Garantie gegen Material-, Verarbeitungs- und Fertigungsfehler für die Dauer von 6 Monaten entsprechend den Bestimmungen dieser Garantiebedingungen.

9.

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers bleiben von dieser Garantie unberührt.

10.

Wir behalten uns das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn Sie eine Reparatur nicht durchführen wollen und das Gerät unrepariert zurück geschickt werden soll.

11.

Bitte beachten Sie:

Bei Reparatur und Austausch dieses Produktes können eingegebene persönliche Daten und Einstellungen verloren gehen oder beschädigt werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Datenverluste jedweder Art und leisten keinerlei Schadenersatz für derartige Datenverluste. Sie sollten vor Geltendmachung des Garantiefalls immer Sicherungskopien aller gespeicherten Daten und Einstellungen erstellen.

12.

Für diese Garantie gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Gerichtstand ist unser Geschäftssitz.

13.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen ganz oder teilweise unwirksam werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

14.

Sollten Sie während der Reparatur oder Austauschzeit ein Leihgerät benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an Ihren zuständigen Fachhändler. Falls dies möglich ist, werden wir Ihnen ein Leihgerät unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ein Anspruch auf die Zurverfügungstellung eines Leihgerätes besteht jedoch nicht. Außerhalb der Garantiezeit wird für die Zurverfügungstellung eines Leihgerätes eine angemessene Leihgebühr zzgl. Transport und Verpackung erhoben.

8 Entsorgungsvorschriften



Entsprechend der geltenden Gesetzeslage werden unsere Geräte nach B2B – Vorschriften der ordnungsgemäßen Entsorgung für gewerbliche Endprodukte zugeführt. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

9 EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EC-Conformity Declaration CE-Déclaration de Conformité

im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II A)
according to Machinery Directive 2006/42/EC (Appendix II A)
au sens de la Directive Machines 2006/42/CE (Annexes II A)

Name und Anschrift des Herstellers/Name and address of manufacturer/Nom et adresse du fabricant:

Reitel Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20
49152 Bad Essen

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird./This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. This declaration will become invalid if any unauthorised modification is made to the product./Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut des composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final. La présente déclaration perd sa validité si des modifications non-autorisées ont été apportées à la machine.

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene Maschine/We hereby declare that the machine described below/Nous déclarons que la machine ci-dessous

Produktbezeichnung/Product name/Nom du produit: Poliereinheit/
Polishing Unit/
Unité de Polissage

Typenbezeichnung/Type/Type: POLIRET CLASSIC

allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit entspricht. Die Schutzziele der Richtlinie 2006/95/EG über elektrische Betriebsmittel werden eingehalten./is in conformity with all applicable requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC. The safety objectives of the Directive on Electrical Equipment 2006/95/EC are adhered to./est conforme aux dispositions applicables de la Directive Machines 2006/42/CE et de la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE. Les objectifs de sécurité de la Directive sur les Matériels Electriques 2006/95/CE sont respectés.

Angewandte harmonisierte Normen/Harmonised standards applied/Normes harmonisées appliquées:

EN 12100:2010	EN 61010-1:2001
EN 60204-1:2006	EN 61000-6-1:2007
	EN 61000-6-3:2007

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen/Representative authorised to compile the relevant technical documentation/Personne autorisée à constituer la documentation technique pertinente:

Daniel Reitel
Reitel Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20
49152 Bad Essen

09.02.2017

Ort, Datum
Place, Date
Lieu, Date

Daniel Reitel, Geschäftsführender Gesellschafter/Managing Director/
Directeur Général

Unterschrift/Signature/
Signature



Wir fertigen nach dem Qualitätsmanagement der ISO 9001:2008 mit gleichbleibenden Prozessstandards.



REITEL Feinwerktechnik GmbH
Sensdamm 20 - 49152 Bad Essen
Tel.: +49(0)5472-9432-0 - Fax: +49(0)5472-9432-40
<http://www.reitel.com> - info@reitel.com